



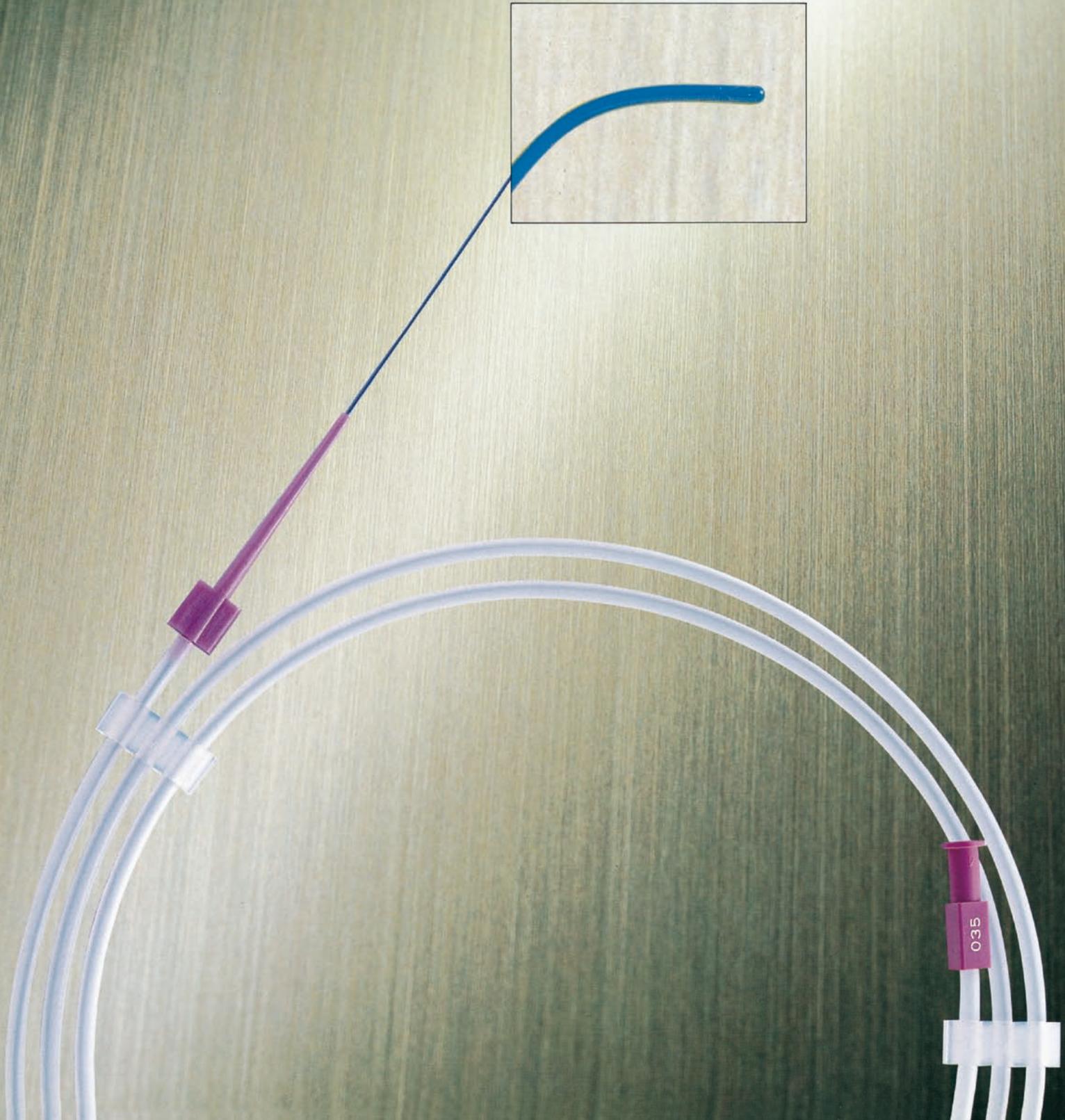

ハナコ・エクセレントワイヤー

EX LEAD WIRE

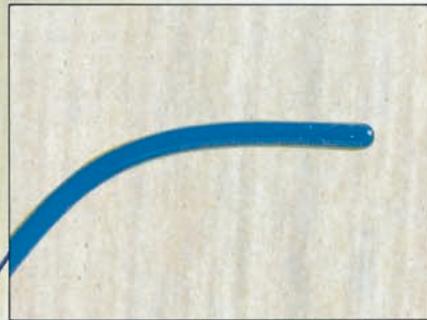

ハナコ・エクセレントワイヤー

EX LEAD WIRE

医療機器承認番号：20300BZZ01107000

特長

- ハナコ・エクセレントワイヤーは、液体に触れることにより潤滑性を発揮する特性となっております。よってスムーズな血管内走行を可能としました。
- 先端部は独自の技術により、たいへんソフトに仕上げられています。
- ワイヤーコアに特殊合金を用いることにより 1:1 のトルク伝達性を実現しました。

使用上の注意

- ①本品は、生理食塩液、血液などで表面をぬらすことにより、潤滑性を発揮する特性となっております。ご使用の際には「ディスペンサー」より取出す前に、後端の「フラッシングコネクタ」よりヘパリン加生理食塩液を注入して本品先端まで十分にぬらし、表面に潤滑性を与えて下さい。
- ②カテーテル内挿入の際には、カテーテル内をヘパリン加生理食塩液で満たして下さい。
- ③本品表面の付着物を拭き取る場合には、ヘパリン加生理食塩液を浸したガーゼにて軽く拭き取り、アルコールまたは消毒剤は使用しないで下さい。
- ④金属外套針は、本品表面のコーティングおよび樹脂被覆を傷つけますので絶対に使用しないで下さい。
- ⑤先端が柔軟でしかも細径のため、抜去時抵抗があった場合はむりに引き抜くと切れる可能性があります。そのときは穿刺針と一緒に抜去して下さい。

製品番号	先端形状 Tip shape	先端柔軟部 (mm) Length of soft tip	外径 (inch) Diameter	全長 (mm) Length
EX-A-025-2000	アングル型 angle	30	0.025	2000
EX-S-032-1500	ストレート型 straight	30	0.032	1500
EX-A-032-1500	アングル型 angle	30	0.032	1500
EX-S-035-1500	ストレート型 straight	30	0.035	1500
EX-A-035-1500	アングル型 angle	30	0.035	1500
EXH-A-035-1500 (ハードタイプ)	アングル型 angle	30	0.035	1500
EX-S-038-1500	ストレート型 straight	30	0.038	1500
EX-A-038-1500	アングル型 angle	30	0.038	1500
EXH-A-035-1800 (ハードタイプ)	アングル型 angle	30	0.035	1800
EXH-A-035-2000 (ハードタイプ)	アングル型 angle	30	0.035	2000
EXH-2J-035-2000 (ハードタイプ)	J型 J	30	0.035	2000

製造販売元



ハナコメディカル株式会社
Hanacomical CO.,LTD.

本社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号
TEL : 048-881-4101(代) FAX : 048-881-5875
URL : <http://www.hanacomical.co.jp>
E-mail : eigyoun@hanacomical.co.jp