


HANACO DRAINAGE KIT /|ナコ・ドレナージキット

医療機器承認番号 20600BZZ00206000

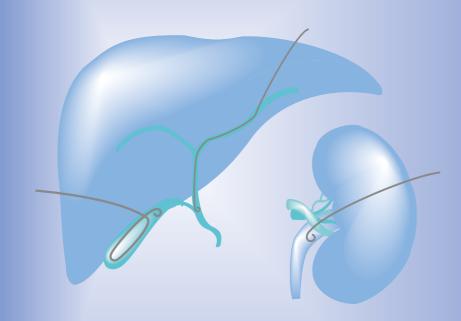

Percutaneous:

cholecystostomy
gallbladder drainage
cholangiodrainage
biliary drainage
nephrostomy

12FB000


製造販売元

本

医療の先端をめざす



社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町 2-24-11 TEL:048-881-4101代) FAX:048-881-5875 URL:http://www.hanacomedical.co.jp E-mail:eigyou@hanacomedical.co.jp

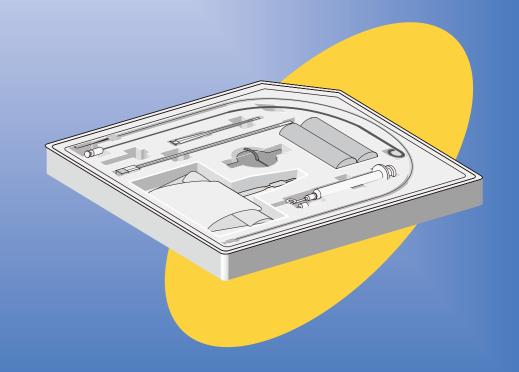

Hanaco DRAINAGE KIT

主な用途

- ●経皮的胆管ドレナージ(1ステップ法)
- ●経皮的胆嚢ドレナージ
- 経皮的腎瘻造設術

キットの種類

キットは、留置チューブの長さにより次の2種類があります.

製品番号	留置チューブの長さ
KIT-280	7F × 280mm
KIT-450	7F × 450mm

包装単位:1箱=5セット入(ご注文は箱単位でお願いします。)

オプション


キットとは別売にて下記のオプションを用意しております。必要に応じてお選びいただけます。

品名	フレンチサイズ (F)	長さ (mm)	側孔数
ストレート留置チューブ	7, 8, 9, 10, 12, 14, 16	280/450	4
ピッグテール留置チューブ	7, 8, 9, 10, 12, 14, 16	280/450	4
ρ型留置チューブ	7, 8	280	4
テフロンダイレーター	7, 8, 9	200	_


「キット構成)



① ガイド針 14G×85mm

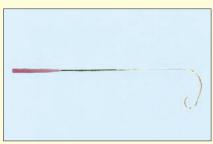


④ リードワイヤー HSS-3J-035×80×820

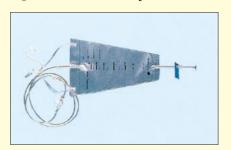


⑦ ドレーンバッグ一式



② US 穿刺針 18G×200mm

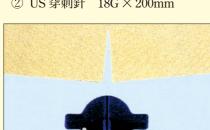


⑤ 固定板 ⑥ 固定用テープ

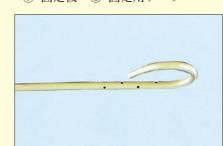


⑧ピッグテール留置チューブ $7F-T \times 280$ mm SH-4 (KIT-280) 7F-T × 450mm SH-4 (KIT-450)



③ 吸引延長チューブ付注射筒

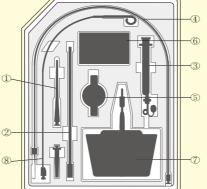

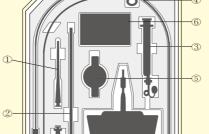







使用方法 ~胆道/胆嚢ドレナージの場合~


1. エコー下に US 穿刺針 ②を目的部位に穿刺す る。(目的までの距離 が 5cm 以上の時はガ イド針①を利用すると よい。)

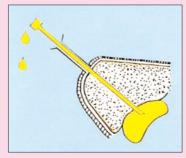

2. US 穿刺針②の内套針 を抜去後、内溶液の流 出を確認する。自然流 出のない場合には、吸 引延長チューブ付注射 筒③により内容物を吸 引してみる。

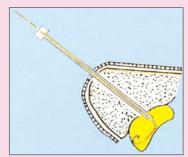

3. US 穿刺針②の外套針 に、リードワイヤー④ を挿入する。内溶液の 圧力が高い場合には吸 引して減圧しておく。 (胆嚢の場合はワイヤ ー先端を胆嚢低部に向 け 8cm 位挿入する。)

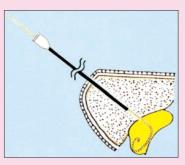

4. US 穿刺針②の外套針 を抜去後、留置チュー ブ⑧をリードワイヤー ④に沿わせて挿入す る。(胆嚢の場合は胆 嚢内で必ずループを作 ること。)



5. リードワイヤー④を抜 去後、皮膚刺入部を太 い絹糸を用いて2針縫 合固定する。

- 6. 留置チューブ⑧を固定板⑤に固定し、固定用テープ⑥ で固定板⑤をしっかり固定する。
- 7. ドレーンバッグ一式⑦を留置チューブ⑧に接続して手 技が完了する。

●参考文献 ●


水沼仁孝、辻本文雄、内山真幸、中谷理子、多田信平、高橋恒夫.超音波誘導下経皮経肝 胆のうドレナージ(US guided PTGBD)一方法と成績一

日本医学放射線学会誌 1987;46:873-879.

Mizunuma K., et al. Complications of percutaneous transhepatic gallbladder drainage. The 79th Annual Meeting of Radiological Society of North America. Chicago December 1993 P307, Volume 189(P) Supplement to Radiology. November 1993

※①~⑦は各両タイプに共通です。⑧はタイプにより280mmもしくは450mmのいずれか一方となります。



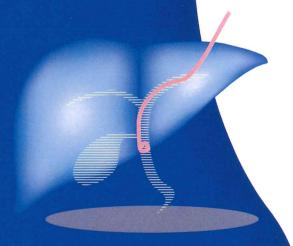

PTCD 経皮的胆管ドレナージ





医療の現場に合わせ3種類、18タイプのセットをご提案します。

ワンステップセット

胆のう、胆管径5mm以上に適した 1ステップ法のセット。0.035インチ スプリングワイヤー入りのスタンダ ードセットです。4種類のセットから 選択できます。


【セット内容】●ガイド針14G ●US対応穿刺針18G ●0.035インチガイドワイヤー ●ダイレーター ●ドレ ナージカテーテル ●固定ディスク ●延長チューブ



ツーステップセット

2ステップ法のセット。0.035インチガイドワイヤーは親水性ガイドワイヤー ヤーかスプリングガイドワイヤー のどちらかを選択できます。


【セット内容】●ガイド針18G ●US対応穿刺針21G ●0.018インチ誘導ワイヤー ●拡張針19G ●0.035 インチガイドワイヤー●ダイレーター ●ドレナージカテ ーテル ●固定ディスク ●延長チューブ

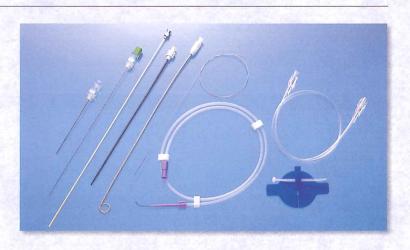

追加・交換セット

追加・交換時に必要な製品をコンパクトにセット。さらに親水性ワイヤーが機能性を向上させます。

【セット内容】 ●0.035インチガイドワイヤー ●ダイレーター ●ドレナージカテーテル

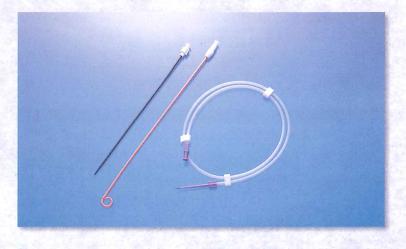

①ドレナージカテーテル //// ②ガイドワイヤー

- ●7Frストレート
- ●7Frピッグテール
- ●7Frロウ型
- ●8Frストレート
- ●8Frピッグテール
- ●8Frロウ型
- ●9Frストレート ●9Frピッグテール
- ●9Frビックテー ●9Frロウ型

- ●0.018イン
 - ●0.018インチ誘導ワイヤー (ステンレス、タングステン)
 - ●0.035インチ 親水性ガイドワイヤー
 - ●0.035インチ スプリングガイドワイヤー
 - ●0.035インチ HSSガイドワイヤー

❸穿刺針・ガイド針・拡張針

- ●14Gガイド針
- ●18Gガイド針
- ●18GUS対応穿刺針
- ●21GUS対応穿刺針
- ●22GUS対応穿刺針
- ●拡張針19G

4ダイレーター・ 固定ディスク

- ●7Frダイレーター
- ●8Frダイレーター
- ●9Frダイレーター
- ●固定ディスク



Appleading the second			- 規格		SERVICE TO SERVICE AND IN
製品番号	名称	ガイドワイヤーのタイプ/径	セット内容/全長	承認販売名称	医療機器承認番号

■セット構成

ワンステップセット					
KIT-S1S7	7Fストレート	スプリングワイヤー	ドレナージカテーテル・US対応穿刺針・ ガイド針・ガイドワイヤー・ダイレーター・ 固定ディスク・延長チューブ	ハナコ・ドレナージキット	20600BZZ00206000
KIT-S1S8	8Fストレート	スプリングワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P1S7	7Fビッグテール	スプリングワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P1S8	8Fピッグテール	スプリングワイヤー			20600BZZ00206000
ツーステップセット					
KIT-S2S7S	7Fストレート	スプリングワイヤー		ハナコ・ドレナージキット	20600BZZ00206000
KIT-S2S8S	8Fストレート	スプリングワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P2S7S	7Fピッグテール	スプリングワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P2S8S	8Fビッグテール	スプリングワイヤー	ドレナージカテーテル・US対応穿刺針・		20600BZZ00206000
KIT-S2S7EX	7Fストレート	親水性ワイヤー	- ガイド針・拡張針・ガイドワイヤー2本・ ダイレーター・固定ディスク・延長チューブ -		20600BZZ00206000
KIT-S2S8EX	8Fストレート	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P2S7EX	7Fビッグテール -	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-P2S8EX	8Fピッグテール	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
追加・交換セット					
KIT-SAC7	7Fストレート	親水性ワイヤー	- - _ ドレナージカテーテル・ ガイドワイヤー・ダイレーター -	ハナコ・ドレナージキット	20600BZZ00206000
KIT-SAC8	8Fストレート	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-SAC9	9Fストレート	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-PAC7	7Fピッグテール	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-PAC8	8Fピッグテール	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000
KIT-PAC9	9Fピッグテール	親水性ワイヤー			20600BZZ00206000

■東昭

ドレナージカテーテル					
RS-070-PET-280-P-SH4	7Fストレート	7F	28cm		16000BZZ00977000
RS-080-PET-280-P-SH4	8Fストレート	8F	28cm		16000BZZ00977000
RS-090-PET-280-P-SH4	9Fストレート	9F	28cm	ハナコ・ディスポーザブル・	16000BZZ00977000
RP-070-PET-280-P-SH4	7Fピッグテール	7F	28cm	PTC-D用留置チューブ	16000BZZ00977000
RP-080-PET-280-P-SH4	8Fピッグテール	8F	28cm		16000BZZ00977000
RP-090-PET-280-P-SH4	9Fピッグテール	9F	28cm		16000BZZ00977000
ガイドワイヤー					
EXH-A-035-800	親水性アングル型035"	0.035"	80cm	ハナコ・エクセレントワイヤー	20300BZZ01107000
F3J-3T-035-800-TF	J型035"	0.035"	80cm	ハナコ・ディスポーザブル・リードワイヤー	15900BZZ00499000
HSS-3J-035-80-820-ST	J型035"	0.035"	82cm	ハナコ・ディスポーザブル・カテーテル交換用リードワイヤー	16000BZZ00978000
PTCD-J-018-650-ST	J型018"	0.018"	65cm	ハナコ・ディスポーザブル・カテーテル交換用リードワイヤー	16000BZZ00978000
US対応穿刺針·拡張	針・ガイド針				
USA-18-200	US対応穿刺針18G	18G	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針	16000BZZ01561000
USA-21-200	US対応穿刺針21G	21G	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針	16000BZZ01561000
USA-22-200	US対応穿刺針22G	22G	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針	16000BZZ01561000
LNA-19-300-D	拡張針19G	19G	30cm	ハナコ・ディスポーザブル長針	16000BZZ00855000
GN-14-85	ガイド針14G	14G	8.5cm	ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針	16000BZZ01561000
GN-18-85	ガイド針18G	18G	8.5cm	ハナコ・ディスポーザブル・穿刺針	16000BZZ01561000
ダイレーター・固定ディ	スク				
TFD-70-200-P	ダイレーター7F	7F	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・テフロン・ダイレーター	16100BZZ00967000
TFD-80-200-P	ダイレーター8F	8F	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・テフロン・ダイレーター	16100BZZ00967000
TFD-90-200-P	ダイレーター9F	9F	20cm	ハナコ・ディスポーザブル・テフロン・ダイレーター	16100BZZ00967000
KTI	固定ディスク			E-10.	

製造販売元



ハナコメディカル株式会社

Hanacomedical co.,LTD.

本 ;

社 〒330-0073 埼玉県さいたま市浦和区元町2丁目24番11号 TEL 048-881-4101代 FAX 048-881-5875